

SODASORB® 及 SODASORB® LF

二氧化碳吸收剂



使用说明

联系方式



Molecular Products Ltd.
 Parkway, Harlow Business Park,
 Harlow, Essex, CM19 5FR, UK
 电话: +44 (0)1279 445111
 电邮: sales@molprod.com

标志

标志	说明	标志	说明
	请查阅使用说明。		警告。
	如包装破损, 请勿使用。		温度限制。
	有效期限。		欧洲共同体授权代表。
	目录。		请勿重复使用。
	批次代码。		保持干燥。
	生产日期。		易碎, 小心轻放。
	生产商。		此面向上。
	避免日晒。		欧洲 CE 标志。
	具有腐蚀性。		具有刺激性。

Molecular Products Ltd

Parkway, Harlow Business Park
 Harlow, Essex,
 CM19 5FR, UK

+44 (0)1279 445111
 sales@molprod.com
 www.molecularproducts.com

一般说明和包装

- SODASORB® 及 SODASORB® LF 二氧化碳吸收剂属医疗用品，用于从麻醉和呼吸治疗设备等系统的呼吸回路气体中去除二氧化碳。

- SODASORB® 二氧化碳吸收剂有以下包装配置：

预包装 保质期 = 2 年	预包装圆盘（1.1 千克），一箱 12 件。
罐包装 保质期 = 3 年	（1.2 千克），一箱 12 件。
塑料壶 保质期 = 3 年	（4.5 千克），一箱 5 件。
塑料桶 保质期 = 3 年	（17 千克）

- SODASORB® LF 二氧化碳吸收剂拥有以下包装配置：

预包装 保质期 = 2 年	预包装圆盘（1.0 千克），一箱 12 件。
罐包装 保质期 = 3 年	（1.1 千克），一箱 12 件。
塑料壶 保质期 = 2 年	（4.2 千克），一箱 3 件。

准备

1. 打开/拆开

- 小心打开容器，避免溢出。

2. 填充和更换

- 更换吸收剂时，应清洁麻醉设备吸收剂罐，尤其是滤网，因为滤网容易堵塞。
- 吸收剂应始终轻拿轻放，避免产生碎片和粉尘。罐倒空后，应小心清除粉尘颗粒。
- 应小心倾倒松散包装的吸收剂，并在罐旋转时将其缓慢倒入罐中，偶尔停下来轻敲侧面。罐应完全填充，但不能满溢。
顶部应留有小空间，以促进气体均匀流过吸收剂罐。吸收剂上层应保持平整。
- 对于预包装的预填充二氧化碳吸收剂罐，请完全除去所有外包装。检查机身、顶部和底部格栅有无缺陷或阻塞物。将罐直接插入兼容的麻醉设备吸收剂罐中。

3. 预检查

- 手术室人员有责任进行任何必要的设备预检查。

Molecular Products Ltd

Parkway, Harlow Business Park
Harlow, Essex,
CM19 5FR, UK

T +44 (0)1279 445111
E sales@molprod.com
W www.molecularproducts.com

第 2 页，共 4 页

IFU Ref 369 V1

储存和处置

1. 储存和搬运



警告：具有刺激性



危险：具有腐蚀性

- 避免接触眼睛、皮肤和衣物。
- 将产品储存在避免长时间紫外线照射的环境中。
- 确保储存区域通风良好。保持容器密封、凉爽（0-35°C、32-86°F）和干燥，避免阳光直射。
- 避免产生空气浮尘，尤其是在倾倒或搬运松散物料时。
- 防止冻结，冻结可能会降低二氧化碳吸收性能并增加细料。
- 小心轻放，尤其是在将产品放入罐中时，以避免吸入可能引起刺激性的粉尘。
- 更多信息请参阅 SDS。

2. 处置

- 使用过的 SODASORB® 或 SODASORB® LF 二氧化碳吸收剂的处置必须由最终用户按照所有适用的法律法规执行。具体处置方法可能因最终用户与吸收剂一起使用的化学制剂（如麻醉剂、酸碱蒸气等）或生物制剂而异。
- 与易燃麻醉剂一起使用的所有 SODASORB® 及 SODASORB® LF 二氧化碳吸收剂应远离热源、火花和明火，因为易燃麻醉剂会有残留。

危险和预防声明

含有：氢氧化钙/氢氧化钠。 **H314** 可导致严重的皮肤灼伤和眼睛损伤。 **P260** 请勿吸入粉尘/烟/气/雾/蒸汽/喷雾。 **P264** 搬运后必须彻底清洗。 **P280** 佩戴防护手套/防护服/护目用具/面部防护。 **P305+P351+P338** 如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。取出隐形眼镜（如有，且容易取出）。继续冲洗。 **P303+P361+P353** 如粘上皮肤（或头发）：立即脱下所有被污染的衣物。用水/淋浴冲洗皮肤。 **P310** 立即呼叫中毒中心/医生。

Molecular Products 及其子公司对因其产品安装或使用不当而造成的任何损害或伤害不承担任何责任。

Molecular Products Ltd

Parkway, Harlow Business Park
Harlow, Essex,
CM19 5FR, UK

T +44 (0)1279 445111
E sales@molprod.com
W www.molecularproducts.com

第 4 页，共 4 页

IFU Ref 369 V1

LB01-00273